

Werkpost: <i>kwaliteit</i>	Verwijzende procedure: Logistieke procedure beschrijving pre-, post-, en analytische fase
-----------------------------------	--

1 Doelstelling

Zorgen voor een correcte monsterafname van stoelgang met het oog op betrouwbare laboratoriumanalyse (microbiologie, PCR, parasitologie, occult bloed, enz.).

2 Algemene aandachtspunten

- Vermijd contact met urine, toiletwater of toiletpapier.
- Idealiter staal verzamelen vóór de opstart van antibiotica.
- Geen staalname bij hevige menstruele bloeding voor occult bloedtest.
- Bij herhaalde staalname (bv. parasitologisch onderzoek): bij voorkeur 3 dagen na elkaar.
- Bij zichtbaar bloed of slijm: dit deel mee overbrengen.

3 Procedure afname

3.1 Materialen en benodigdheden

- Propere monstercontainer: plastic potje, bedpan, ...
- Spatel of wegwerplepel



3.2 Afnamerichtlijnen volwassenen en kinderen

- Vang de stoelgang op in een zuiver opvangmiddel (bv. bedpan, plastieken zakje of vershoudfolie over toiletpot, wegwerpkom).
- Gebruik een wegwerplepel of spatel om een portie stoelgang over te brengen in het potje:
 - Bij vaste stoelgang: hoeveelheid ter grootte van een walnoot (± 5 g).
 - Bij vloeibare stoelgang: minstens 5 mL.
- Sluit het potje goed af.
- Label het potje correct met naam en geboortedatum.

3.3 Afnamerichtlijnen bij baby's

- Gebruik bij voorkeur de luier voor staalopname.
- Open de luier voorzichtig.
- Schep met een lepel of spatel een portie stoelgang over in het potje (bij voorkeur waar het contact met urine minimaal is).
- Sluit het potje goed af en label het potje correct met naam en geboortedatum.

4 Bewaring en transport

- Lever het monster zo snel mogelijk aan het laboratorium (binnen 1 uur).
- Indien later: bewaren in koelkast (2–8°C), max. 24 uur.